



NASEN SAUGER

Staubsauger

EINFACH GENIAL.

- ✓ macht die Nase schonend frei
- ✓ von Kliniken, Ärzten und Hebammen empfohlen
- ✓ alle Materialien medizinisch geprüft

 Hergestellt in Deutschland.

- ab dem 1.Tag Ihres Babys
 - entfernt **wirksam** das angestaute Nasensekret
 - ermöglicht **freies Atmen**
 - bewirkt **störungsfreies Stillen** von Babys
 - **keine schlaflosen Nächte** mehr
 - erhältlich in Ihrer Apotheke, im Internet oder per Telefon
-
- einfache Reinigung • leichte Handhabung



Verstopfte Nasen – wer kennt das nicht?

Kleinkinder atmen fast ausschließlich durch die Nase. Ist diese verstopft, folgen schlaflose Nächte, das Kind bekommt Schwierigkeiten beim Atmen und das Stillen von Babys wird gestört. Es besteht die Gefahr von Folgeerkrankungen. Die regelmäßige Entfernung des angestauten Nasensekretes und das Freihalten der Nasenatmung sind deshalb sehr wichtig. **Für diesen Zweck ist der *medinaris*® NASENSAUGER-STAUBSAUGER ausgezeichnet geeignet.**

Funktionsweise

Der *medinaris*® NASENSAUGER-STAUBSAUGER muss an einen handelsüblichen Hausstaubsauger angeschlossen werden. Unabhängig, welche Saugleistung der Staubsauger hat, der *medinaris*® NASENSAUGER-STAUBSAUGER reduziert die Saugkraft automatisch auf die Stärke eines normalen Ausschnaubens. Um ein wirksames Absaugen zu erreichen, ist es dabei ausreichend, den *medinaris*® NASENSAUGER-STAUBSAUGER nur an die Nase zu führen.



Gebrauchsanweisung

1. Stecken Sie den Saugerkopf (A) mit dem Auffangkolben (B) zusammen in den Außenkolben (C), so dass der Saugerkopf nach außen zeigt.
2. Verbinden Sie den Verbindungskolben (D) mit dem Schlauch Ihres Staubsaugers.
3. Fixieren Sie Ihr Kind, vor allem den Kopf.
4. Schalten Sie den Staubsauger an und führen Sie den Saugerkopf (A) an das Nasenloch Ihres Kindes.
5. Saugen Sie wenige Sekunden lang, immer wieder absetzend an beiden Nasenlöchern, bis die Nase vom Schleim befreit ist.

Achtung! Der Absaugvorgang soll nur von Erwachsenen durchgeführt werden! Bei der Anwendung an mehreren Kindern ist eine Zwischenreinigung erforderlich oder benutzen Sie ein *medinaris*® Wechsel-Set. (www.medinaris.de)



- (A) Saugerkopf
- (B) Auffangkolben
- (C) Außenkolben
- (D) Verbindungskolben

Reinigung

Nehmen Sie den Saugerkopf (A) mit dem Auffangkolben (B) zusammen aus dem Außenkolben (C). Spülen Sie den Auffangkolben (B) wenn nötig von außen ab. Jetzt trennen Sie den Saugerkopf (A) vom Auffangkolben (B). Spülen Sie alle Teile mit heißem Wasser aus. Nach jeder Anwendung soll der Saugerkopf (A) ausgekocht werden. Verwenden Sie kein Sterilisationsgerät. Um die Reinigung zu vereinfachen, fragen Sie bitte nach der *medinaris*® Reinigungsbürste!




**NASEN
SAUGER**
Staubsauger



Emese Krause · Pegasusweg 2 · D-99092 Erfurt
Tel.: 0361 2263431 · Fax: 0361 6549172

Mail: info@medinaris.de | Internet: www.medinaris.de
Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485